


PCR 検査取扱説明書

唾液採取からご返送に必要なセット内容

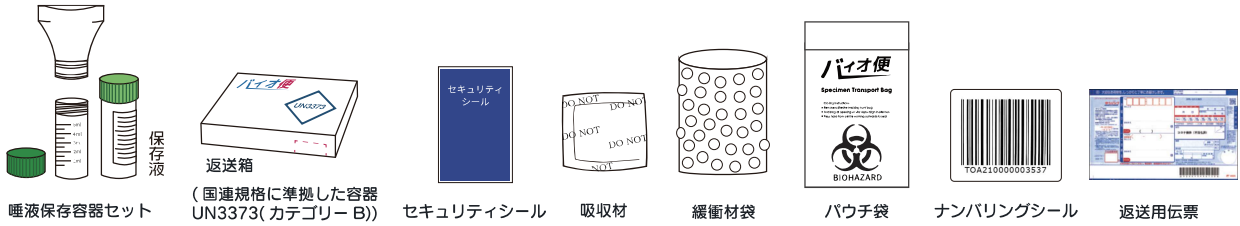

PCR 検査の専用 Web ページ

- PCR 検査を行うにあたり、お申し込み手続きが必要となります。専用 Web ページにアクセスいただき、申し込みを行ってください。
- 検体だけを **クリニック PCR 検査ラボ** へご返送いただいても検査に必要なお客様の情報が不足しているため検査や通知が実施できません。その場合でもキャンセル・返金・交換などは一切できませんので、あらかじめご了承ください。
- 返送料金はお客様負担となります。

タケショウショップで PCR 検査キットを購入のお客様専用 Web 申込ページ
https://takeshocert.coronavi19.jp/pcr_userinfo_top.php



クリニックで PCR 検査キットを購入のお客様専用 Web 申込ページ
https://takeshocert.coronavi19.jp/pcr_userinfo_entrystore.php



検査前の 注意事項

- 採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い、水で軽く口をゆすいでから採取してください。
- 消化酵素により、感度が低下することが指摘されております。そのため、飲食前に採取してください。
- ウイルスの物理的除去をさけるため、検体採取前に歯磨き、マウスウォッシュやうがいを行わないでください。避けられない場合は目安として30分ほど空けてください。

01


採取時に水で軽く口をゆすいでください。唾液保存容器に付属のろうとをしっかりと取り付けます。喉にウイルスが溜まりやすいので、軽くマッサージをしてから唾液を採取してください。



02

唾液を目盛りの「2ml」まで入れてください。泡等がなるべく入らないように気をつけてください。


※正しい検査のために唾液の量にはご注意ください。

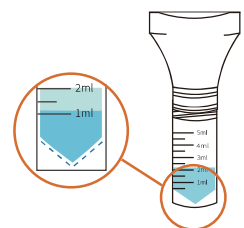

03


ろうとを外して保存液を唾液保存容器に全て足し入れて、ふたを最後までしっかりとねじ込んで締めてください。

※唾液が漏れていると検査ができません。
※ろうとはプラスチックごみとして捨ててください。

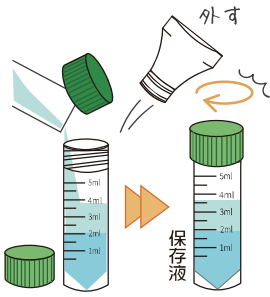


05

唾液保存容器と吸収剤を緩衝材袋に入れ、緩衝材袋を二つ折りしてください。

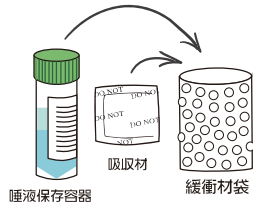

07


パウチ袋を二つ折りにして、返送箱に入れ、箱のふたを閉めてください。

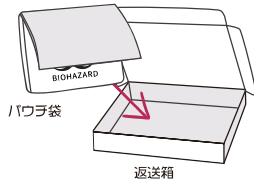

09

返送用伝票の「お届け先」欄に「送付先」情報を、「品名」欄に「コロナ検体（不活化済）」を記入し、「UN3373」のマークが入っている面ではなく、**箱の裏面に貼ってください。**

郵便局の窓口または集荷サービスにてご返送ください。

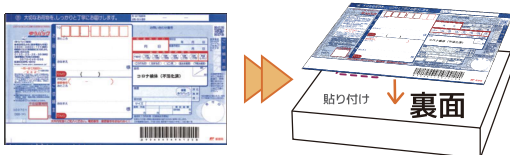


返送用伝票の「お届け先」欄に右側の「送付先」情報をご記入ください。

04

ふたをした唾液保存容器にナンバリングシールを貼ってください。

※ふたに被らないように、シールを縦に貼ってください。

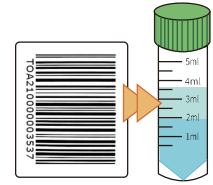

06


唾液保存容器が入った緩衝材袋をパウチに入れ、白いシールを剥がします。シール部分を折り返して、しっかりと密封してください。

※パウチ袋内の空気を必ず抜いてください。



08

箱のふたが開かないように、所定の位置にセキュリティシールを貼ってください。

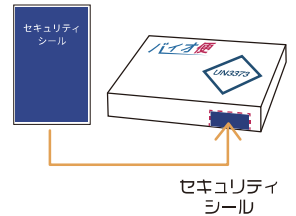

送付先

〒104-0054
東京都中央区勝どき3丁目4-6
ニュー勝どきビル306
勝どき駅前内科皮ふ科クリニック
PCR検査ラボ

検査結果通知について

当クリニックで検体を受領してから 24 時間以内に、メールにて検査結果をお知らせいたします。

※陰性証明書は別途メールで送付いたします。

※陽性証明書の発行は行っていません。陽性結果を通知後、当クリニックより別途お客様へご連絡をいたします。症状等をお伺いした後、保健所へ発生届を提出いたします。保健所より連絡があり次第、指示に従った行動をお願いいたします。保健所から連絡が来るまでは自宅にて待機をお願いいたします。

※陰性証明書付き PCR 検査キットをご購入のお客様は、検体結果に関わらず返金はいたしません。あらかじめご了承ください。

チェック項目

- 唾液採取容器にナンバリングシールを貼っていますか？
- PCR 検査 WEB 申し込みはお済みですか？
- ゆうパックご利用の場合は、返送用伝票を「UN3373」のマークが隠れないよう箱の裏面に貼っていますか？