

# 「鼻咽頭ぬぐい液」対応型抗原検査キット 取扱説明書

## 研究用試薬

本製品は体外診断用医薬品承認を取得しておりません。  
検査を実施する前に本書をよくお読みください。



製品構成

アルミパウチに記載されている有効期限をご確認ください。期限切れの場合使用しないでください。  
アルミパウチ内の滅菌スワブ、検査キット本体を確認して下さい。

## 「使用方法」

### パターン1 鼻咽頭ぬぐい液を使用する場合

1. スワブを鼻腔から右図の咽頭後壁まで挿入します。
2. 咽頭後壁表面にスワブを当て粘膜表皮を採取します。
3. 鼻腔から滅菌スワブを引き出します。


### パターン2 咽頭ぬぐい液を使用する場合

1. スワブを口腔から咽頭に挿入します。
2. 中咽頭、扁桃腺およびその他の炎症部位を適度な力で3回こすり取ります。
3. 口腔から滅菌スワブを引き出します。

### パターン3 唾液を使用する場合

舌の上でスワブを転がし唾液を付着させてください。

※唾液を直接チューブに入れしないで下さい。

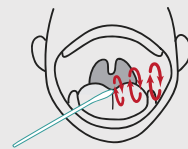

使用動画は弊社ホームページをご参照ください


※本検査キットは上記3パターンの検体を全て対応しますが、検査精度を高くするために、鼻咽頭ぬぐい液による検査をお勧めします。

1. 抽出チューブ先端のアルミ蓋を剥がします。
2. スワブを抽出チューブに挿入し、スワブの先端を完全にバッファ液に浸しながら5回以上かき回してください。
3. チューブを押してスワブから液体を絞り出すように抜き取り、1分程度放置します。
4. 抽出チューブにキャップを確実に取り付けます。
5. 抽出された検体をテストデバイスの注入口に3~5滴滴下します。
6. 3~15分の間に結果を読み取ります。



結果の読み取り  
3~15分の間  
※15分以降は無効になります。

## 検査結果

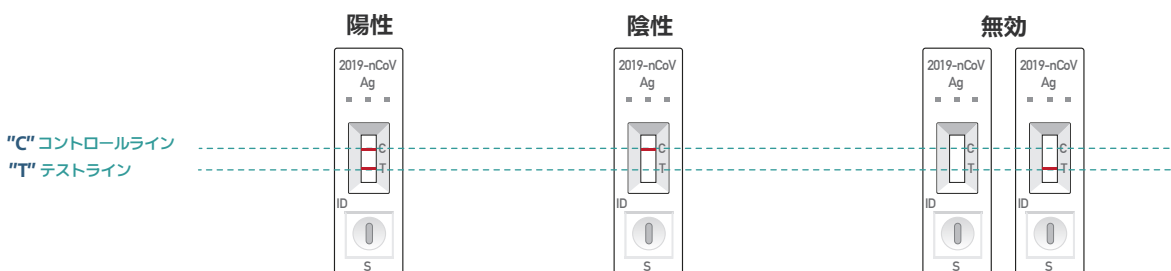

「C」コントロールラインのみ線が出ることを持って陰性と表現します。  
「C」コントロールラインおよび「T」テストラインに線が出ることを持って陽性と表現します。