

渡航用 PCR 検査取扱説明書

1. 渡航用 PCR 検査利用上のご注意

下記内容を必ずご確認ください！

●陰性証明書受取目安時間

検体到着時間	結果通知時間 & 証明書発行時間
月～木 午前 (09:00～12:00)	当日 15:00～18:00
月～木 午後 (12:00～18:00)	翌日 9:00～12:00
土 日 午前 (09:00～12:00)	当日 15:00～18:00
土 日 午後 (12:00～18:00)	翌日 9:00～12:00

※金曜日は PCR 検査を実施しておりませんので、ご注意ください。

※ご自身でスケジュール調整の上、渡航先規定の出国前時間に合うよう検体を送付してください。

※各国の最新情報は必ずご自身でご確認してください。

※陰性証明書の有効期間については、渡航先の大使館又は航空会社へお問い合わせください。

※陰性証明書発行後のキャンセル・返金・交換などは一切できませんので、あらかじめご了承ください。

※航空機搭乗時に搭乗拒否 または 渡航国の出入国管理局の審査で入国拒否された場合も、一切その責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

●PCR 検査を行うにあたり、検査申し込みが必要です。

※検体を返送する前に、必ず専用 WEB ページにアクセスしていただき、申し込みを行ってください。

※検体採取時間の入力項目がございますので、検体採取時間を必ずメモしてください。

※検体だけをクリックへご返送いただいても検査に必要なお客様の情報が不足しているため検査や通知が実施できません。その場合でもキャンセル・返金・交換などは一切できませんので、あらかじめご了承ください。

※返送料金はお客様負担となります。

タケショウショップで渡航用 PCR 検査キットをご購入のお客様専用 Web 申込ページ
https://takeshocertmk.coronavi19.jp/pcr_userinfo_top.php



●陰性証明書のフォーマットは外務省指定の有効「出国前検査証明フォーマット」を使用しており、以下の項目が含まれます。

交付年月日	Date of issue	性別	Sex	検体採取日時	Sampledate/Time
氏名	Name	検体採取方法 唾液	Nasopharyngeal Saliva	医療機関名	Medical institution
パスポート番号	Passport No.	リアルタイム法による RT-PCR 検査	Real time RT-PCR	医療機関の住所	Address of the institution
国籍	Nationality	検査結果	Result Negative	医師の署名	Signature by doctor
生年月日	Date of Birth	結果判明日	Date of Examination	医療機関の押印	An imprint of a seal

※必要記載項目は事前に必ずご自身で航空会社や渡航先の大使館等へご確認ください。

2. 検体採取からご返送に必要なセット内容




3. 検査前の注意事項

- ・採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い、水で軽く口をゆすいでから採取してください。
- ・消化酵素により、感度が低下することが指摘されております。そのため、飲食前に採取してください。
- ・ウイルスの物理的除去をさけるため、検体採取前に歯磨き、マウスウォッシュやうがいを行わないでください。避けられない場合は目安として 30 分ほど空けてください。




01

採取時に水で軽く口をゆすいでください。検体採取用綿棒を開封し、綿棒を取り出します。綿棒先端を 30 秒間口に含んでください。綿棒先端を舌上にあて、唾液をしっかりと含ませてください。
※その際、綿棒先端を嚙まないでください。

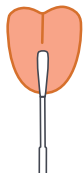

02


30 秒経過後、不活化液が入った保存容器のキャップを開け、綿棒を口から出し、速やかに保存容器に入れてください。

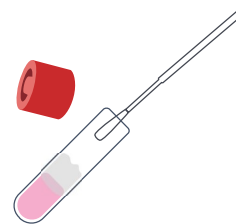

03

綿棒を切断部分で折り、先端部分を保存容器内に残し、キャップをしっかりと閉めてください。


※保存容器内の液体が漏れていると検査できません。

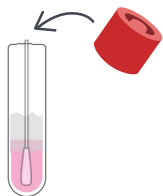

04


キャップを閉めた保存容器にナンバリングシールを貼ってください。

※キャップに被らないように、シールを縦に貼ってください。

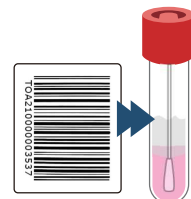

05


保存容器と吸収材を緩衝材袋に入れ、緩衝材袋を二つ折りしてください。

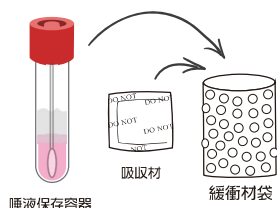

06

保存容器が入った緩衝材袋をパウチ袋に入れ、白いシールを剥がします。シール部分を折り返して、しっかりと密封してください。


※パウチ袋内の空気を必ず抜いてください。

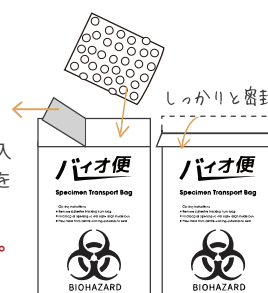

パウチ袋


07

パウチ袋を二つ折りにして、返送箱に入れ、箱のふたを閉めてください。

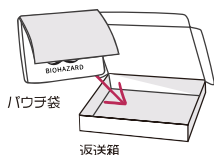

08

箱のふたが開かないように、所定位置にセキュリティシールを貼ってください。

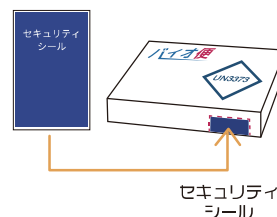


セキュリティシール

09



返送用伝票の「お届け先」欄に右側の「送付先」情報を、「品名」欄に「**コロナ検体(不活化済)**」を記入し、「UN3373」のマークが入っている面ではなく、**箱の裏面に貼ってください。**
郵便局の窓口または集荷サービスにてご返送ください。

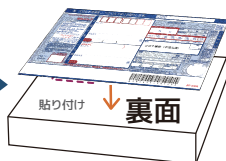

送付先

〒333-0842
埼玉県川口市前川2丁目10番11号
メディカルモール1 階

前川クリニック

4. 検査結果通知について

- ・当クリニックで検体を受領に、検査後メールにて検査結果をお知らせいたします。
- ・陰性証明書は添付ファイル(.PDF 形式)にて送付いたします。

※陽性証明書の発行は行っておりません。陽性結果を通知後、当クリニックより別途お客様へご連絡をいたします。症状等をお伺いした後、保健所へ発生届を提出いたします。保健所より連絡があり次第、指示に従った行動をお願いいたします。保健所から連絡が来るまでは自宅にて待機をお願いいたします。
※渡航用陰性証明書付き PCR 検査キットをご購入のお客様は、検体結果に関らず返金はいたしません。あらかじめご了承ください。

5. チェック項目

- ☐ 保存容器にナンバリングシールを貼っていますか？
- ☐ PCR 検査 WEB 申し込みはお済みですか？
- ☐ ゆうパックご利用の場合は、伝送用伝票を「UN3373」のマークが隠れないよう箱の裏面に貼っていますか？