

新型コロナウイルス 中和抗体検査キット取扱説明書

○内容物の確認

商品内容



本検査キットには左図のものがあります
検査キット本体、スポイト(キット本体に同包)
検査液(バッファー液)
採血針
消毒紙、絆創膏

絆創膏



消毒紙



バッファー液



スポイト




採血針



キット本体



○使用方法

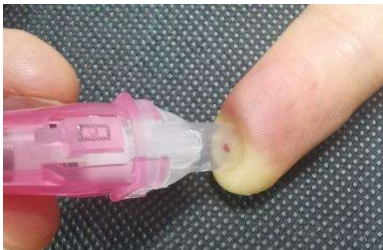


①指を消毒紙で拭き、採血針で血液を出します。
詳細は裏面を参照にしてください。



②指を圧迫し、2.5 mm程度の血液を用意してください。




③血液を付属のスポイトで吸ってください。血液を奥まで吸いすぎると出にくくなりますのでご注意ください。

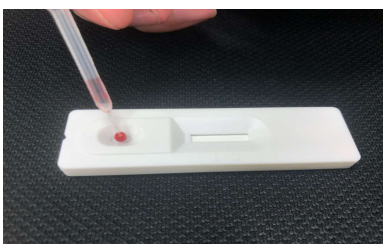

④血液をキットに 20 μ l (1滴もしくは穴の紙面が全て赤くなる程度) 入れてください。入れすぎにはご注意ください。



⑤バッファー液を用意し、ふたを開けてください。

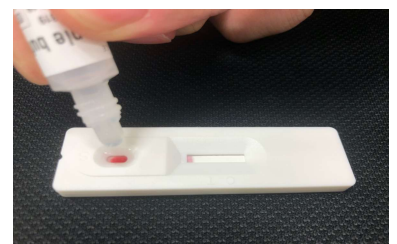

⑥検査液を60 μ l (2~3滴) キットに入れて数分お待ちください。液が右の検査紙に浸透していきます。



⑦検査液が検査紙に徐々に染みていきます。



⑧図のように C ラインに線が出れば検査は成功です。逆に C ラインに線が出なければ検査失敗です。結果は裏面を参考に判断ください。

○検査針使用方法

ニプロ社製の場合

指先の穿刺の場合



インサートパーツ(保護キャップ)を持って、メインボディを2,3回まわして取り外します。

※穿刺針はメインボディ内に格納されています。



本品を入差し指と中指ではさんで親指を穿刺ボタンの上にあてる形で持ち、穿刺部(指先、手のひら等)に押しあてます。



穿刺ボタンを押すと作動し、穿刺針が出ます。作動するまで本品を穿刺部から離さないでください。

<注意>
採血の際は穿刺部位や穿刺器具を動かさないようにすること。







周囲を軽く押して、血液を採取してください。

○検査結果

検出あり

検出なし

無効

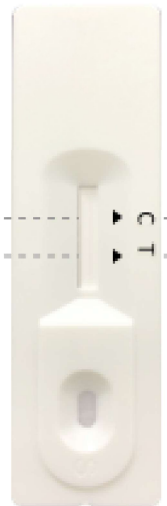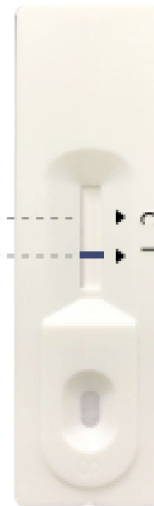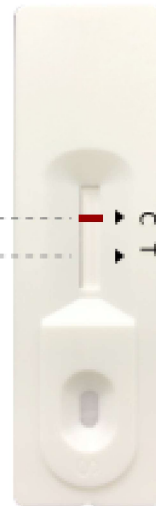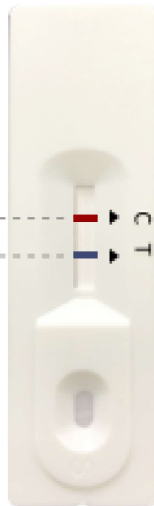

“C” コントロールライン

“T” テストライン